

## PINPost - Návod k použití

[Download](#)


1) Pomocí flexibilního preparačního nástroje (NiTi) o vhodné šířce odstraňte z dřevěné dutiny gutaperčovou výplň. Veškerý endodontický výplňový materiál musí být odstraněn po celé délce preparace kromě minimálně 5 mm gutaperči v apikální oblasti kořene. Vypláchněte kanálek vodou a vysušte jej papírovými čepy. Pracovní plocha by měla být co nejlépe izolována od vlhkosti. Doporučujeme použít kofferdam.



2) Změřte hloubku napreparovaného kanálku pomocí endodontických nástrojů nebo parodontální sondy. Mějte také na paměti výšku korunky. V tomto případě je sice nutný jeden krok navíc, ale ušetří se tak množství použitého materiálu. Je také možné použít celý čep bez změření hloubky kanálku, tato varianta je rychlejší, ovšem vyžaduje více materiálu.



3) Proveďte adhezivní proceduru standardním způsobem (leptání, bonding, atd.). Pokud nechcete postupovat standardním způsobem, použijte v následujícím kroku duální samoadhezivní pryskyřičný cement.

4) Vyplňte dřevěnou dutinu duálním cementem nebo duálním samoadhezivním pryskyřičným cementem, v závislosti na zvoleném způsobu adhezivní procedury.



5) Pokud jste si změřili hloubku kanálku, vyjměte čep PINPost z tuby a ustříhněte jej ostrými nůžkami na požadovanou délku. Zbytek čepu můžete použít později, je-li dostatečně dlouhý.

Pokud jste si hloubku kanálku nezměřili, použijte celý čep.



6) Naneste na povrch čepu PINPost tenkou vrstvu pryskyřičného cementu a vložte jej do kanálku.



7) Vložte čep do kanálku.



8) Podle potřeby zopakujte kroky 5 a 6 (podle šířky kanálku se vkládá 4-6 čepů na kanálek).



9) Odstraňte přebytečný cement v oblasti flaringu.




10) Zpolymerujte cement dle pokynů výrobce.



11) Pokud jsou čepy příliš dlouhé, lze je zkrátit diamantovým vrtáčkem.



12) Na horní konce čepů naneste adhezivum.

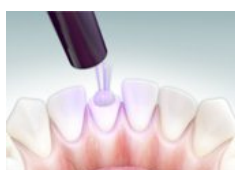

13) Vytvrdíte adhezivum dle pokynů výrobce.



14) Vybudujte korunku klasickým způsobem pomocí kompozitu na korunky a můstky.



15) Hotová korunka vybudovaná pomocí čepů Dentapreg® PINPost.