

Splint - Návod k použití

Extrakoronární nebo intrakoronární * dlahy

[Download](#)

* Postup pro zhotovení intrakoronární dlahy se od extrakoronární dlahy liší pouze preparací žlábků na dlahovaných zubech. Šířka žlábků musí být dostatečně velká, aby do něj bylo možné vložit pásek Dentapreg®, jehož tloušťka je 2 mm.



1) Změřte požadovanou délku dlahy. Na měření použijte zubní vosk, vlákno wedjets, zubní nit nebo jiný vhodný materiál.



2) Očistěte povrch zubů nylonovým kartáčkem a čisticí pastou.



3) Zajistěte suché pracovní pole, např. bavlněnými válečky nebo použijte kofferdam.



4) Izolujte mezizubní prostory dřevěnými nebo plastovými klínky




nebo použijte vlákno Wedjets.



5) Zdrsňte povrch dlahovaných zubů diamantovým vrtáčkem nebo abrazivním diskem. Tento druh preparace není nutný u krátkodobých dlah (post-traumatické dlahy).




6) Naleptejte povrch zubů a mezizubní prostory 37% kyselinou ortofosforečnou. Při nanášení dbejte pokynů výrobce.

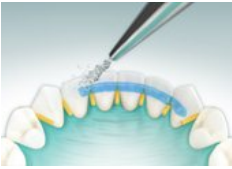

7) Důkladně opláchněte a osušte.



8) Aplikujte adhezivní systém.

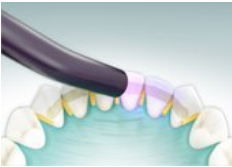

9) Zpolymerujte adhezivní systém, řiďte se pokyny výrobce.



10) Aplikujte tenkou vrstvu (cca. 0,5 mm) flow kompozitu po celé délce dlahované oblasti. **NEVYTVRZUJTE!**



11) Vyměňte pásek z blistru a ustříhněte požadovanou délku (stačí běžné nůžky). Oddělte ochrannou fólii a papír. Po odstranění ochranné fólie a papíru se pásku nedotýkejte holými rukama. Doporučujeme použít nepudrované latexové rukavice. Zbytek pásku vraťte zpět do blistru a umístěte do speciálního ochranného obalu (Light save box), který je součástí balení. Skladujte v temnu, ideálně v ledničce. Tímto způsobem lze pásek skladovat až po dobu 2 týdnů, aniž by došlo k výrazné změně vlastností pásku.



12) Umístěte pásek do vrstvy flow kompozitu.



13) Adaptujte pásek na povrch zubů a odstraňte přebytky flow kompozitu.



14) Vytvrdíte pásek lampou, každý zub po dobu 40 vteřin.



15) Pro zajištění hladkého povrchu dlahy překryjte celý její povrch tenkou vrstvou flow kompozitu.



16) Vytvrďte flow kompozit podle pokynů výrobce.



17) Odstraňte případné přebytky flow kompozitu.



18) Vyartikuluje dlahu a vyleštete její povrch.



19) Hotová dlahu.

Důležitá upozornění

- Dlahu by neměla překážet okluzi.
- Bodová fixace dlahy flow kompozitem nestačí na připevnění dlahy k povrchu zubů. Upevněte pásek Dentapreg® k zubům po celé jeho ploše.